


Provedení testu



Namočte testovací proužek do moči až po odpovídající značku (MAX) po dobu **10-15 vteřin**. Tekutina by neměla přesáhnout značku MAX.

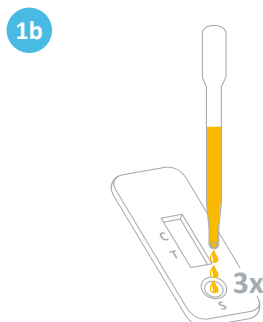

Přidejte 3 kapky do moči (cca 120 µL) do každého otvoru pro vzorek. Zajistěte, aby se moč nedostala do kontaktu s reakčním polem.



Výsledek testu odečtete **po 5 minutách**. Pozitivní výsledek se doporučuje potvrdit po 10 minutách.

Vyhodnocení výsledků



Podrobnější popis naleznete v návodu k použití.

nal von minden Drug-Screen® Kratom rychlý test

Rychlý test pro analýzu moči, cut-off: 100 ng/ml

Produkt	Formát	Vzorek	Parametr/Cut-off (ng/mL)	Obj. č.	Velikost balení
Drug-Screen KRA100 rychlý test	Testovací proužek	Moč	100 ng/mL	101099V	50 testů
Drug-Screen KRA100 rychlý test	Testovací kazeta	Moč	100 ng/mL	102099V	30 testů

Náš **český tým** Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy na telefonním čísle **800 143 685** (bezplatné číslo z pevné linky) nebo na czech@nal-vonminden.com

We help you care!

