



Název výrobku: **Trichomonas vaginalis selektivní půda**  
Kód výrobku: **98033**  
Zkratka výrobku: **Z-TRV**

## Návod k použití

### Použití:

Polotekuté médium, které se používá pro izolaci a kultivaci Trichomonas species.

### Barva media:

světle zelená

### Princip:

Kaseinový pepton, cystein, hovězí a kvasničný extrakt jsou zdrojem aminokyselin, dusíku, síry, uhlíku, vitamínů a stopových složek. Maltóza je zdrojem energie. Chloramfenikol je širokospektré antibiotikum, které inhibuje velké množství G+ a G- bakterií. Koňské sérum se přidává jako růstový faktor vyžadovaný trichomonádami.

### Teoretické složení (g/l destilované vody):

Pankreatický hydrolyzát kaseinu	12,0
Hovězí extrakt	2,0
Kvasničný extrakt	5,0
L-cystein HCl	1,0
Maltóza	2,0
Chloramfenikol	0,1
Metylenová modř	0,003
Koňské sérum	50,0 ml
Agar	1,0


Výsledné pH  $6,0 \pm 0,2$

### Uchování:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Datum účinnosti: 1.1.2011  
Vydání: 2  
Výtisk: 1  
Strana: 1 (celkem 2)

 V I A M A R  
International s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
14000 Praha 4, ČR



**Pracovní postup:****Inokulace:**

Vyšetřovaný vzorek vyočkujte přímo do bujónu.

**Kontrola kvality:**

<i>Trichomonas vaginalis</i>	růst
<i>Proteus vulgaris</i>	inhibice
<i>Candida albicans</i> CCM 8261	růst

**Balení výrobku:**

Zkumavky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.

Datum účinnosti: 1.1.2011  
Vydání: 2  
Výtisk: 1  
Strana: 2 (celkem 2)



V I A M A R  
International s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
14000 Praha 4, ČR

