

URČENÝ ÚČEL – ČESKÝ JAZYK

Pro použití se systémem Macroduct Advanced pro odběr vzorku potu při diagnostice cystické fibrózy.

OBSAH

6x Macroduct Advanced kolekotry

P1

12x Pilogelové disky Macroduct Advanced

P2

6x Malé uzavíratelné nádoby

P3

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Složení

Pilogelové disky Macroduct Advanced obsahují 0,5 % nitrátu pilokarpinu, agar, methylparaben a propylparaben.

Disky Macroduct Advanced Pilogel jsou klasifikovány jako nebezpečné:



VAROVÁNÍ

Při každém iontoforetickém testu hrozí menší riziko popálení, viz návod k použití Macroductu.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

P264 – Po manipulaci si důkladně umyjte ruce, předloktí a obličej.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P301+P312 – Při požití: Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře.

P330 – Vypláchněte ústa.

P501 – Obsah/kontejner odevzdejte na autorizované sběrné místo odpadů.

PŘÍPRAVA

Pilogelové disky Macroduct Advanced jsou připraveny k použití.

Zajistěte dobré větrání pracoviště.

Používejte osobní ochranné pomůcky – ochranné rukavice.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte v chladničce, ale nezmrazujte. Zmrazené nebo prasklé disky se nesmí používat. Pevně nasadíte uzávěr, aby nedošlo k dehydrataci disků.

Disky, které ztratí vodu, se zmenší. Disky jsou za běžných podmínek použití, skladování a přepravy nereaktivní.

POŠKOZENÝ OBAL

Nepoužívejte, pokud je obalový materiál poškozen. Poškození gelů by mohlo mít vliv na výkon.

POSTUP

Pilogelové disky Macroduct Advanced jsou určeny pouze pro zdravotnické nebo laboratorní pracovníky.

Přijměte běžná bezpečnostní opatření a dodržujte správnou laboratorní praxi.

Pilogelové disky Macroduct Advanced jsou určeny pouze na jedno použití.

Přečtěte si návod k použití produktu Macroduct 3710.

POŽADOVANÉ, ALE NEPOSKYTOVANÉ MATERIÁLY

Macroduct Advanced Sweat Collector System 3710.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Materiály nebo pevné zbytky odstraňte na autorizovaném místě.

	Výrobce		Kód šarže/číslo šarže		Spotřebujte do data expirace
	Obsah		Jednorázové použití		Přečtěte si návod k použití
	Katalogové číslo		Omezení teploty		Zplnomocněný zástupce
	Výrobek 1		Výrobek 2		Výrobek 3
	Evropská shoda		Obsahuje léčivou látku		Zdravotnický prostředek



ELITechGroup Inc.
370 West 1700 South
Logan, Utah 84321
Spojené státy americké



MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel Straße 7
66386 St. Ingbert,
Německo



BioVendor
LM®

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Karásek 1767/1, 621 00 Brno
Czech Republic
SRN: CZ-IM-000027009

Květen 2024
57-5122-01A