

# Hemolyzační roztok



**Hemolyzační roztok pro použití při kvantitativním in vitro stanovení hemoglobinu A1c (HbA1c) v plné krvi fotometricky**

## **Katalogové číslo**

1 4570 99 10 113

1 x 500 ml

## **Popis**

oneHbA1c hemolyzační roztok se používá pro přípravu vzorku z plné krve, kalibrátorů a kontrol pro stanovení HbA1c s DiaSys one HbA1c FS metodou (kat. č. 1 3308... a 1 3329...).

## **Složky a koncentrace reagensie**

Voda

Stabilizátor

## **Skladování**

Reagensie je stabilní až do konce měsíce expirace vyznačeného na balení, pokud je skladována při 2 – 25°C a pokud je zabráněno znečištění. Reagensii nezmrazujte.

## **Upozornění**

Dodržujte nezbytná opatření pro použití laboratorních reagensií.

## **Nakládání s odpady**

S odpady nakládejte dle požadavků platné legislativy.

## **Příprava**

Reagensie je připravena k použití.

## **Příprava vzorku**

Hemolyzační roztok 1000 µl

Vzorek/kalibrátor/kontrola 20 µl

Promíchejte a nechte stát 5 minut, nebo dokud není patrný úplný rozklad.

## **Vyrobeno**

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Německo