

GL Standard FS

Standard pro použití se systémem DiaCapil pro kvantitativní in vitro stanovení glukózy a laktátu na SensoStar GL one /SensoStar GL / SensoStar GL30/ SensoStar GL30 touch a SensoStarG (enzymatické amperometrické analyzátoři)

Katalogové číslo

920 529 100 x 1700 µl
920 530 10 x 920 529

Popis

GL Standard FS je roztok na vodní bázi určený na kalibraci měřicího analyzátoři.
Standard je naplněn v modrých zkumavkách.

Skladování

GL Standard FS musí být skladována při 5 – 30°C a chráněn před světlem.

Stabilita

Neotevřený GL Standard FS je stabilní do konce měsíce expirace vyznačeného na balení.
Musí být zajištěno správné skladování a manipulace s výrobkem.
Otevřené zkumavky musí být použity do 24 hodin.

Upozornění a varování

1. Použití reagensů jiného výrobce v kombinaci s tímto standardem není povoleno.
2. Přečtěte si bezpečnostní listy a přijměte nezbytná opatření pro použití laboratorních činidel.
3. Pouze pro profesionální použití.

Příprava

Standard je připraven k použití, předředěný v poměru 1+50 a naplněný.

Postup

Postupujte podle uživatelského manuálu.

Hodnoty kalibrátoru/návaznost

Hodnoty kalibrátoru GL Standard FS jsou nezávislé na čísle šarže standardu a jsou v návaznosti na primární referenční materiál.


Literatura

Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

Odpadové hospodářství

Postupujte podle místních předpisů.

Výrobce

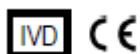

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim, Německo

Parametr	Koncentrace
Glukóza	216 mg/dl
	12 mmol/l
Laktát	90 mg/dl
	10 mmol/l