



NÁVOD K POUŽITÍ

Kód : 98053
Název: Ogawa
Zkratka: Z-OG

Použití:

Ogawa půda se používá ke kultivaci a izolaci různých druhů Mykobakterií jiných než *Mycobacterium leprae*.

Barva media:

Světle zelený, matný šikmý agar

Princip:

Selektivita media je založena na přítomnosti malachitové zeleně a minerálních látek, které inhibují růst většiny bakterií doprovodné flóry.

Teoretické složení (g/600 ml destilované vody):

Dihydrogenfosforečnan draselný	6,0
Glutamát sodný	6,0
Glycerol	36,0
Malachitová zeleň	0,04
Vaječná emulze	1200,0 ml

Uchovávání:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Pracovní postup:

Inokulace:

Veškeré biologické vzorky, které se budou očkovat na půdu, musí být dekontaminovány.

Inkubace:

Vzorek inkubujte 3-9 týdnů při 37 °C

Kontrola kvality:

Mycobacterium tuberculosis H 37RV růst

Mycobacterium aurum Rebuffet strain – H37Ra růst

Balení výrobku:

Zkumavky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.