


MYCOFAST[®] Revolution

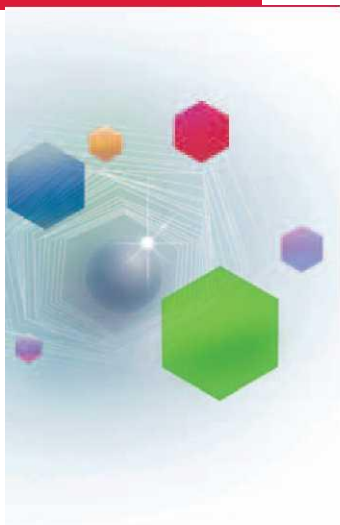

Screeningová metoda

DIAGNOSTIKA UROGENITÁLNÍCH MYKOPLAZMAT



Detekce, určení počtu, identifikace a testování antimikrobiální citlivosti

- Kompletní diagnostika v dvoufázovém přístupu
- Antibiotika odpovídající novým mezinárodním doporučením
- Cenově výhodný screening za 24 hodin
- Optimalizované zpracování vzorku:
Vzorky uchovávány až 72 hodin před analýzou
- Velmi bezpečná a flexibilní metoda
- Optický, kolorimetrický odečet

... Nejlepší je ještě lepší!

 **ELITech**
Microbiology Reagents

BENEFITY :

METODIKA :

Kompletní diagnostika

- **KROK 1 (MYCOFAST® Screening Revolution test) - 24/48 h**
 - Detekce *U. urealyticum* (U.u) a *M. hominis* (M.h)
- **KROK 2 (MYCOFAST® Revolution test) - 24/48 h**
 - Určení počtu, identifikace
 - Testování antimikrobiální citlivosti

Kvalitní diagnostika

CITLIVOST

3 hladiny detekce *U. urealyticum* (U.u)

SPECIFIČNOST

MYCOFAST® Revolution:

Identifikace založená na přirozené rezistenci k antibiotikům: Lynkomycin/SXT/Erythromycin

Screening Revolution:

Specifická M.h a U.u růstová média.
Zlepšení funkčnosti, spolehlivé výsledky a snížený počet chybných výsledků

SPOLEHLIVOST

5 antibiotik (LVX/MXF/E/CM/TE) testovaných v různých koncentracích

RYCHLÉ VÝSLEDKY

S.Mh = růstový aktivátor pro *M. hominis* (M.h)
Určení počtu během 24 hodin

Jednoduché použití

- Reagencie připraveny k použití
- **NOVÉ** integrované růstové médium
- Optický kolorimetrický odečet
- Bez nutnosti přístrojů

Bezpečné a flexibilní použití

- **NOVÉ** transportní médium: Vzorky před analýzou konzervovány až 72 hodin
- **NOVÝ** uzavírací systém vaniček Revolution

Velmi přesné výsledky


- **Detekce a určení počtu *U. urealyticum* v koncentraci 10^3 , 10^4 , a $\geq 10^5$ CCU/ml**

Přesné určení počtu U.u pro detekci patologické prahové hodnoty:

- $\geq 10^4$ CCU/ml pro vzorky z uretry
- $\geq 10^3$ CCU/ml pro vzorky moči, spermatu a endotracheální vzorky

- **Detekce a určení počtu *M. hominis* v koncentraci 10^4 CCU/ml**

$\geq 10^4$ CCU/ml pro cerviko-vaginální vzorky

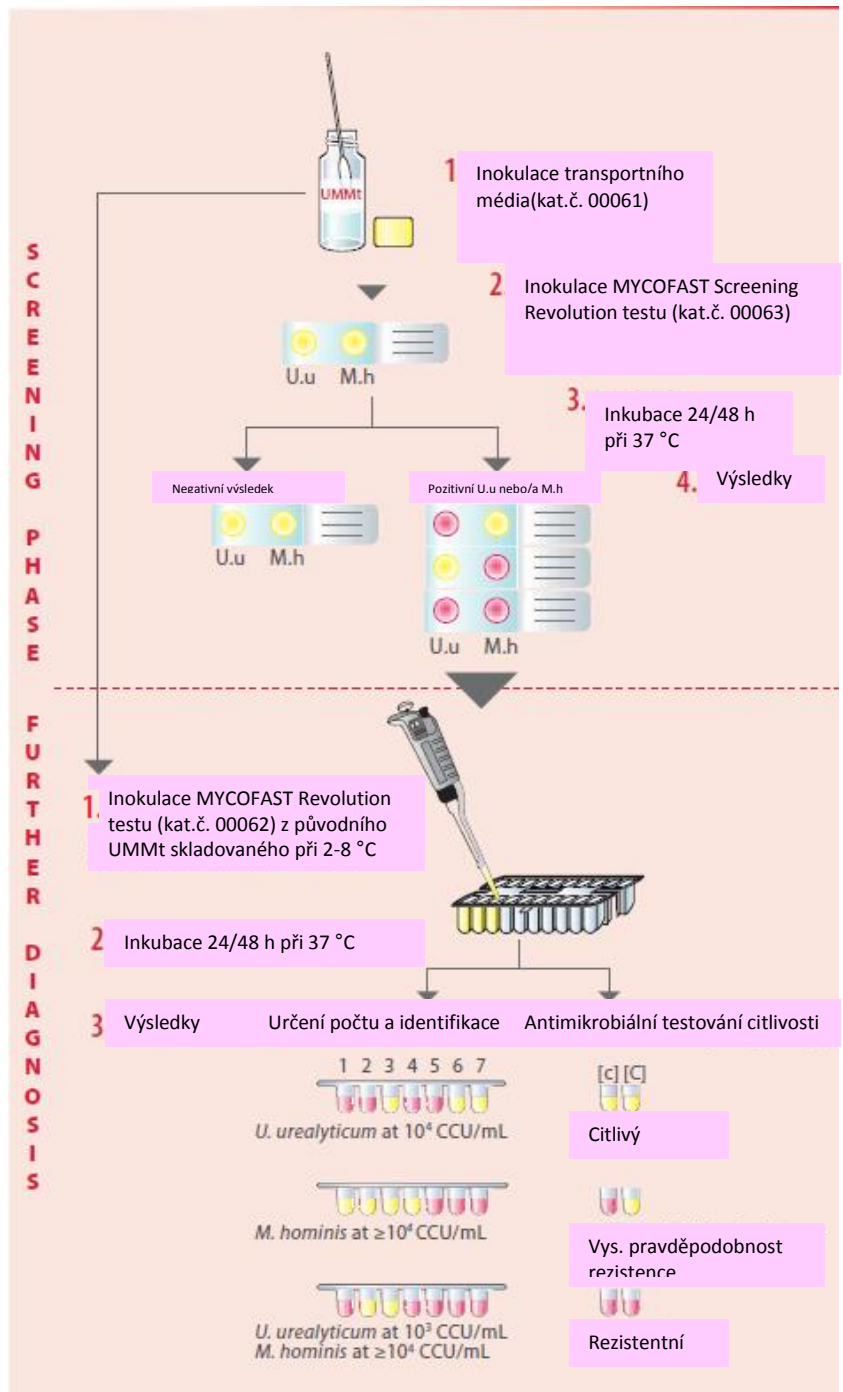

PRODUKTOVÁ ŘADA

KAT.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	ÚČEL
00061	UMMt Revolution	50 lahviček	Další transportní médium
00063	MYCOFAST® Screening Revolution	50 testů	
00062	COMPLEMENT MYCOFAST® Revolution	25 testů	Další testovací vaničky
00064	MYCOPLASMA Stabilizer (volitelné)	100 testů	Aditivum pro skladování vzorku > 56 hodin
00900	MYCOPLASMA Control (volitelné)	12 testů	U.u a M.h kontrolní kmeny

Distributor pro ČR:

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
Provozovna: Karásek 1/1767, Brno, 621 33